



华康普美  
HKPROMED

微·创·手·术·的·引·领·者

## 带烟道绝缘窥器消毒方法

**高温消毒：**控制高温高压消毒的时间：

134 ℃ 0.210MPa < 10 分钟      121 ℃ 0.105MPa < 20 分钟

**浸泡消毒：**2% 戊二醛或万金消毒液（次氯酸钠）使用盐水清洗。

30 分钟可达到消毒 10 小时以上可达到灭菌

**等离子消毒（推荐）：**灭菌温度 35 ℃-45 ℃ 灭菌周期 30-50 分钟

低温等离子灭菌器既可对金属医疗器械和非金属医疗器械进行低温灭菌。

**注意：**禁止与有菱角或坚韧物品接触，避免消毒/杀菌和储存有任何形式的机械压力

建议不要重复更换消毒方法，会对器械有一定的损伤。

北京华康普美科技有限公司

[www.hkpromed.com](http://www.hkpromed.com)